

SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM, protector cutáneo no irritante estéril en spray, toallita y torunda aplicadora.



Características

- **Barrera tópica efectiva**, forma una película que protege la piel.
- **Ayuda a preservar la integridad de la piel**, proporciona una barrera efectiva de hasta 96 horas de duración y previene el posible dolor e irritación durante la retirada de productos adhesivos.
- **Protege la piel intacta o dañada** de la irritación causada por la orina y/o incontinencia fecal, jugos gástricos y drenaje de heridas, adhesivos y fricción.
- **Hipoalergénico**, el producto es apto para su uso en personas adultas, niños y bebés recién nacidos.
- **No irritante**, está formulado sin alcohol para reducir el riesgo de picor en piel dañada.
- **Facilita la adhesión de apósitos**, esparadrapos, tubos de drenaje, catéteres externos y dispositivos de ostomías.
- **Se aplica fácilmente**, incluso en zonas difíciles como codos, rodillas o talones.
- **Se adapta de forma natural a la piel del paciente** y permite el movimiento sin que la piel se agriete o pele.
- **Puede utilizarse en zonas muy sensibles**, como es el caso de la piel periestomal.
- **Fórmula densa**, sólo es necesaria una aplicación para crear una capa protectora.
- **Tras su aplicación se seca en 30 segundos.**
- **Aumenta el confort** del paciente y facilita el trabajo a los profesionales y a los ciudadanos.

Descripción

SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM es un líquido estéril con un solvente no irritante que en contacto con el aire forma una barrera protectora en forma de película que se seca rápidamente.

Indicaciones

SECURA[◊] NO-STING BARRIER-FILM está indicado para la protección de la piel ante la fricción, frente a productos adhesivos, tales como apósitos adhesivos, esparadrapos, dispositivos de ostomías, etc., así como ante productos orgánicos que puedan lesionar la piel (orina, heces, exudado). En condiciones normales sólo se requiere de una aplicación por cura. En los casos en los que se necesite una protección máxima se pueden realizar dos aplicaciones.

Instrucciones de uso

Seguir las instrucciones de uso del médico, enfermera o profesional sanitario. En caso contrario, seguir el modo de empleo descrito a continuación.

1. Antes de la aplicación de SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM la piel debe estar limpia y seca.
2. Aplicador de torunda o toallita: Aplicar una capa uniforme sobre todo el área que desea protegerse. Aerosol: Sujetar la boquilla del aerosol una distancia de 10 a 15 cm de la piel y aplicar una capa lisa y uniforme de la película sobre todo el área que desee protegerse, mientras mueve la boquilla con un movimiento amplio.
3. SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM se seca en aproximadamente 30 segundos. Si no ha aplicado el aerosol en todo el área que desea cubrir, espere a que el área original de aplicación se haya secado y volver a aplicar en el área no cubierta.
4. Para ofrecer la máxima protección, puede volverse a aplicar una segunda capa de SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM y dejarse secar antes de taponar el área con un apósito u otro producto adhesivo.
5. Si SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM se aplica sobre un área de pliegues de la piel u otro contacto piel-piel, asegurarse de que las áreas de contacto de la piel están separadas a fin de permitir que la capa se seque completamente antes de volver a la posición normal.
6. Cuando se utilice debajo de productos adhesivos, es necesario volverlo a aplicar cada vez que se cambie el producto ya que el adhesivo puede quitar la película.

SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM, protector cutáneo no irritante estéril en spray, toallita y torunda aplicadora.

Asegurarse de que SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM esté seco antes de aplicar los productos adhesivos.

7. Cuando se utilice como barrera protectora contra líquidos corporales, heces, orina, etc., y no se apliquen productos adhesivos sobre la piel: (a) se recomienda volver a aplicar SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM cada 24-72 horas, dependiendo de la frecuencia de limpieza. (b) En casos extremos (p.ej. diarrea constante) en los que se precise una limpieza muy frecuente, podrán ser necesarias aplicaciones más frecuentes (p. ej. cada 12 – 24 horas).
8. No es necesario quitar SECURA[◊] NO-STING BARRIER FILM antes de la aplicación.

Composición









Spray: Copolímero de acrilato de hexametildisiloxano.

Torunda: espuma de poliuretano unida a un bastón de polietileno e impregnada con una capa de líquido (copolímero de acrilato de hexametildisiloxano).

Toallita: tejido no tejido impregnado con una capa de líquido (copolímero de acrilato de hexametildisiloxano)

Presentación

| Código Producto | Descripción | Unidades / Envase | Envases / Embalaje | Unidad mínima de venta | Código EAN | Código Nacional |
|-----------------|--|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| 66800710 | SECURA NO-STING BARRIER FILM Spray 28ml | 1 | 12 | 1 envase | 5000223469641 | 159081.7 |
| 66800712 | SECURA NO-STING BARRIER FILM Toallitas 1ml | 50 | 20 | 1 envase | 5000223469580 | 161116.1 |
| 66800711 | SECURA NO-STING BARRIER FILM Torundas 3ml | 50 | 12 | 1 envase | 5000223469597 | 161118.5 |

| Certificación | Composición | Esterilidad | Conservación | Fabricante |
|---|---|---|--|--|
| ON n° 0086 CE n° 519229 Clase CE I, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008  |  |  |  3 años   |  Smith & Nephew Inc. 970 Lake Carillon Drive St. Petersburg. Florida, 33716. USA  Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, SAU |

Leyenda símbolos

| | |
|---|--|
|  No contiene látex |  Producto esterilizado por irradiación |
|  Caducidad |  No reutilizar |
|  Manténgase en lugar seco |  Temperatura de almacenamiento |
|  No exponer el producto a la radiación solar |  No utilizar si el envase está abierto o dañado |
|  Fabricante |  Representante autorizado |

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.U

Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

A-28123297

educacionAWM@smith-nephew.com, www.smith-nephew.com