


BOLUS

1. Pulsa la tecla



2. Desbloquea, para desbloquear, **pulsa a la vez**

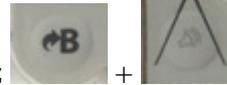

3. Para introducir insulina (BOLUS):

1. Pulsa



2. Pulsa para subir las unidades que debe ponerse, si te EQUIVOCAS, pulsa para bajar las centésimas de unidad.



3. Cuando ya tengas las unidades deseadas, Pulsa y estarás introduciendo las unidades de insulina.



Ahora en la pantalla veras como la maquina va sumando unidades hasta llegar a la insulina que tu has indicado que introduzca.

Una vez llegada a la cantidad la maquina se APAGA.

BLOQUEO DE MAQUINA: OBLIGATORIO

1. Pulsa



2. Pulsa varias veces y llega a **Utilidades**, que es el final del menú principal-



3. Pulsa entras en el menú de bloqueo de maquina



4. Pulsa la maquina te pregunta si estas seguro de bloquear la maquina



5. Pulsa confirmas que si estas seguro del bloque.



YA SE PUEDE GUARDAR LA BOMBA.

